



Say hi! To the future of recovery.

Erlebe das volle Intensitätsspektrum in einem Gerät und drei Frequenzstufen, die deine nova fon Anwendung noch vielseitiger machen. Verbinde das Gerät ganz einfach mit unserer kostenlosen nova fon App, um Ihre Behandlungsfortschritte immer im Blick zu behalten.


Bevor es losgeht, hier noch ein paar Infos und Tipps, wie Du dein nova fon in Betrieb nehmen, auf dich personalisieren und zusammen mit der App am wirkungsvollsten nutzen kannst.



Lade die kostenfreie nova fon App herunter, um folgende **zusätzliche Features** zu aktivieren:

Individuell abstimmbare Intensitätsbereiche — Guided Treatment:

- Anwendungsvideos mit Einstellungsempfehlungen für das nova fon one+
- Speicherbare persönliche Behandlungsprogramme für mehrere Anwender:innen
- Tracking des Behandlungsverlaufs

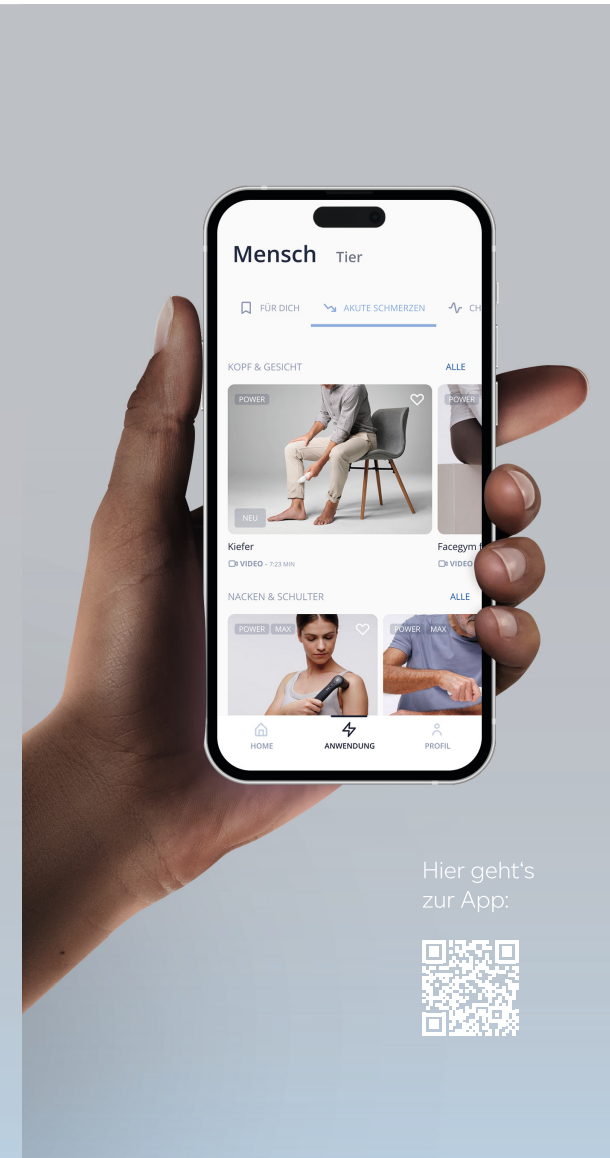


Hier geht's zur App:



novafon®

Getting started Manual
Begin your journey with
your **novafon one+**

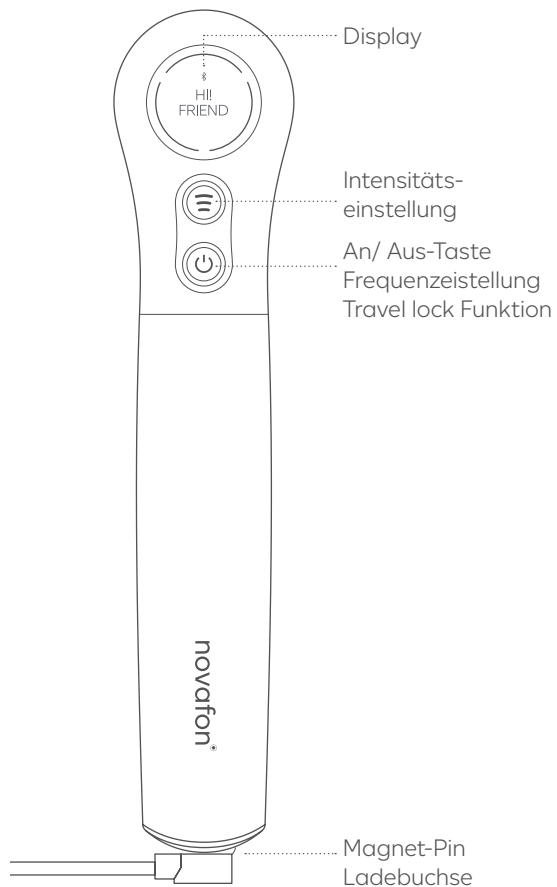

01



Entsperren

- Über die An/ Aus Taste das Gerät anschalten
- Bei geschlossenem Symbol befindet sich das novafon im Travel Lock (Transportsicherung)
- Zum Entsperren und Sperren die An/ Aus Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, das Gerät startet bei 100 Hz
- Mit den Tasten „Frequenzeinstellungen“ kannst Du die Frequenz wechseln und das Gerät ausschalten oder in den Standby-Modus setzen

02



Verbinden

- Stelle sicher, dass Du die aktuelle Version der novafon App installiert hast, um dein neues Gerät mit der App koppeln zu können
- Öffne die App, aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone und schalte für Android die Standortfreigabe frei
- Halte beide Tasten auf deinem novafon one+ für ca. 5 Sekunden gedrückt – auf deinem novafon Display erscheint nun „searching ...“
- Folge den Anweisungen in der App, um dein novafon one+ zu koppeln

03



Personalisieren

Werde kreativ und lasse dich von deinem novafon one+ individuell begrüßen. Wähle deine Lieblings-Displayfarbe und lege deine favorisierte Behandlungsdauer fest.



04



Behandeln

- Deine persönlichen Einstellungen kannst Du ganz einfach über die novafon App im Tab „Mein NF“ vornehmen
- Jede Intensität, so wie Du sie gerade brauchst
- Individualisiere die 3 Intensitätsstufen so, wie sie für dich angenehm sind

novafon®

Du hast Fragen?
Wir sind für dich da!

Wende dich dafür gerne an unseren Kundenservice unter:
novafon.de/kontakt-zu-novafon



Jetzt einscannen und mehr erfahren

Wir möchten dich bei der Anwendung deines neuen novafon Gerätes bestmöglich unterstützen und bieten dir regelmäßig **kostenlose Web-Seminare** zu den verschiedensten Anwendungsbereichen an: novafon.de/webinare



Jetzt einscannen und unsere Academy entdecken



2500104-00_V01 Stand: 05/26