



Gezielt mobilisieren.
Wirksam lösen. Neu spüren.
Die neue Aufsatzgeneration für
das novafon max.

Das neue Mobility-Set für dein novafon max und max+ erweitert bewährte Aufsätze um zusätzliche Kraft und Präzision. Für tiefergehende Mobilisation, gezielte Narbenbehandlung und spürbare Schmerzlinderung.

Mehr Tiefe. Mehr Beweglichkeit.
Mehr Lebensqualität – in kleinen, aber
entscheidenden Schritten.



*Diese Aufsätze sind nicht im Standard-Lieferumfang
enthalten und nicht mit anderen novafon Geräten kompatibel.

Kegelaufsatz max

Der Kegelaufsatz max ermöglicht präzises Mobilisieren und Lösen von Gewebe – ideal auch für feine Strukturen an den Händen und Unterarmen. Er hilft, Faszien, Narben und Sehnen gezielt zu verschieben und somit deren Beweglichkeit zu verbessern.




Fokusaufsatz max

Der Fokusaufsatz max bringt punktuelle Tiefenwirkung genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Er eignet sich besonders zur gezielten Behandlung von Schmerz- und Triggerpunkten in lokal begrenzten Regionen.



Sensi-Roller max

Der Sensi-Roller max ist ideal für die großflächige Behandlung. Er stimuliert die Oberflächensensibilität, fördert die Durchblutung und unterstützt die sensorische Stimulation bei Missempfindungen.

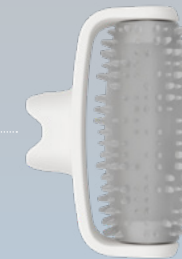


novafon®

Getting started Manual
Begin your journey with
your novafon max.

Tief wirksam.
Einfach stark.

Professionelle Schmerzlinderung.
Für die Praxis. Für zuhause.
Für dich.

Das **novafon max** wurde in enger Abstimmung mit Physio- und Ergotherapeut:innen entwickelt. Auf Basis unserer bewährten und stärksten Technologie – und mit einem Ziel: Die Tiefenwirkung der lokalen Vibrationstherapie so praxistauglich und einfach wie möglich zu machen. Die Kombination aus tiefer Gewebestimulation und großer Anwendungsfläche, sowie zwei wirkungsvolle Frequenzen (50 und 100 Hz) und fünf direkt einstellbare Intensitätsstufen machen das novafon max zu einer verlässlichen Lösung für die gezielte Schmerzbehandlung – sowohl im therapeutischen Umfeld als auch zuhause.

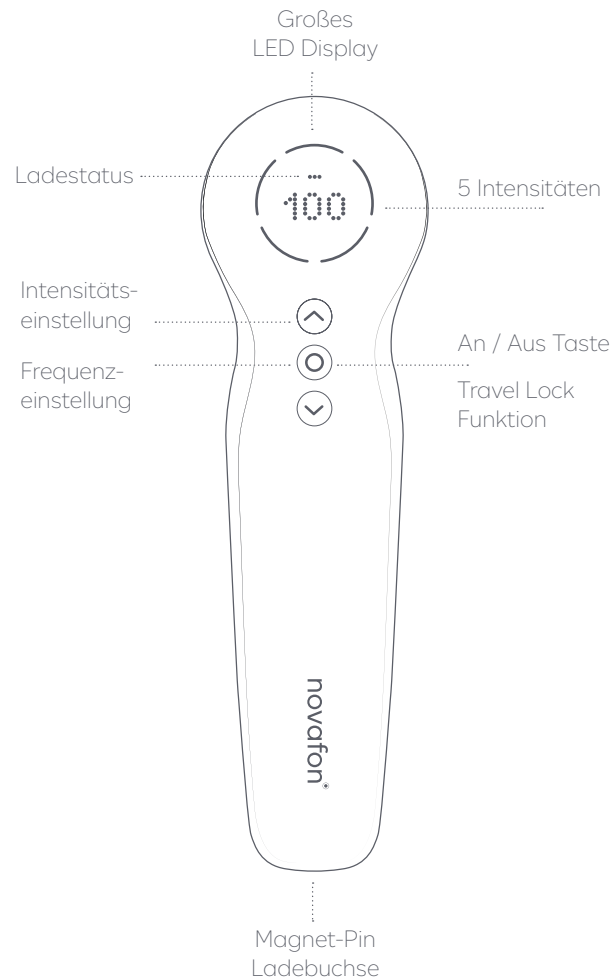

01



Entsperren

- Dein novafon Gerät wird mit aktiviertem Travel Lock (Transportsicherung) ausgeliefert.

- **Gerät entsperren**
Halte die mittlere Taste mehrere Sekunden gedrückt. Warte, bis sich der komplette Intensitätsring abbaut.

Dein Gerät ist nun entsperrt und startet automatisch mit 100 Hz auf der niedrigsten Intensitätsstufe.

- **Gerät ausschalten**
Halte die mittlere Taste gedrückt, bis das Gerät ausgeht.

- **Travel Lock aktivieren**
Um das Gerät wieder in den Travellock zu versetzen, halte die mittlere Taste mehrere Sekunden gedrückt.
Der gesperrte Zustand ist erkennbar, wenn alle 5 Segmente des Rings aufleuchten.

02



Intensitäten und Frequenzen

- **Intensität einstellen**
Mit den oberen und unteren Pfeiltasten kannst du die 5 Intensitäten stufenweise anpassen.
- **Frequenz ändern**
Die mittlere Taste dient zur Umschaltung der Frequenzen.
- Viel Freude bei der Behandlung.

novafon®

Du hast Fragen?
Wir sind für dich da!

Wende dich dafür gerne an unseren Kundenservice unter:
novafon.de/kontakt-zu-novafon



Jetzt einscannen und mehr erfahren

Wir möchten dich bei der Anwendung deines neuen Novafon Geräts bestmöglich unterstützen und bieten dir regelmäßig **kostenlose Web-Seminare** zu den verschiedensten Anwendungsbereichen an: novafon.de/webinare



Jetzt einscannen und unsere Academy entdecken



2500102-00_V01 Stand: 10/25