

Lokale Vibrationstherapie für
Therapeuten und Selbstanwender



1

BEWÄHRTE WIRKWEISE

Akute und chronische Schmerzen lindern, neurologische Erkrankungen rehabilitieren

Die Vibrationen regen über die tiefgreifende Gewebestimulation körpereigene Mechanismen an und unterstützen die Rehabilitation einer Vielzahl von Erkrankungen:¹



Sehnenschmerzen
reduzieren



Greiffunktion
verbessern



Muskelschmerzen
lindern



Gangbild
verbessern



Gelenkschmerzen
lindern



Stimmfunktion
verbessern

¹ Lundeberg (1984a): Pain alleviation by vibratory stimulation. Murillo et al. (2014): Focal vibration in neurorehabilitation. Barsties (2020b): Treatment Effectiveness of NOVAFON Local Vibration Voice Therapy for Dysphonia Treatment. Serritella et al. (2020): Local Vibratory Stimulation for Temporomandibular Disorder Myofascial Pain Treatment: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Preliminary Study. Avvantaggiato (2020): Localized muscle vibration in the treatment of motor impairment and spasticity in post-stroke patients: a systematic review.

2

LEISTUNGSSTARKER AKKU

Volle Flexibilität ohne Kabel – zu Hause, in der Praxis und unterwegs

Das neue NOVAFON bietet volle Bewegungsfreiheit dank seines langlebigen Akkus. Kabellos und praktisch – ermöglicht den Einsatz an nahezu jedem Ort.

3,5 h

Ø Gesamt-Akkulaufzeit

360°


Behandlungs- und Bewegungsfreiheit



3

BREITES BEHANDLUNGSSPEKTRUM

Intelligente Einstellmöglichkeiten – Frequenz und Intensität anpassbar, je nach Behandlung und Empfinden

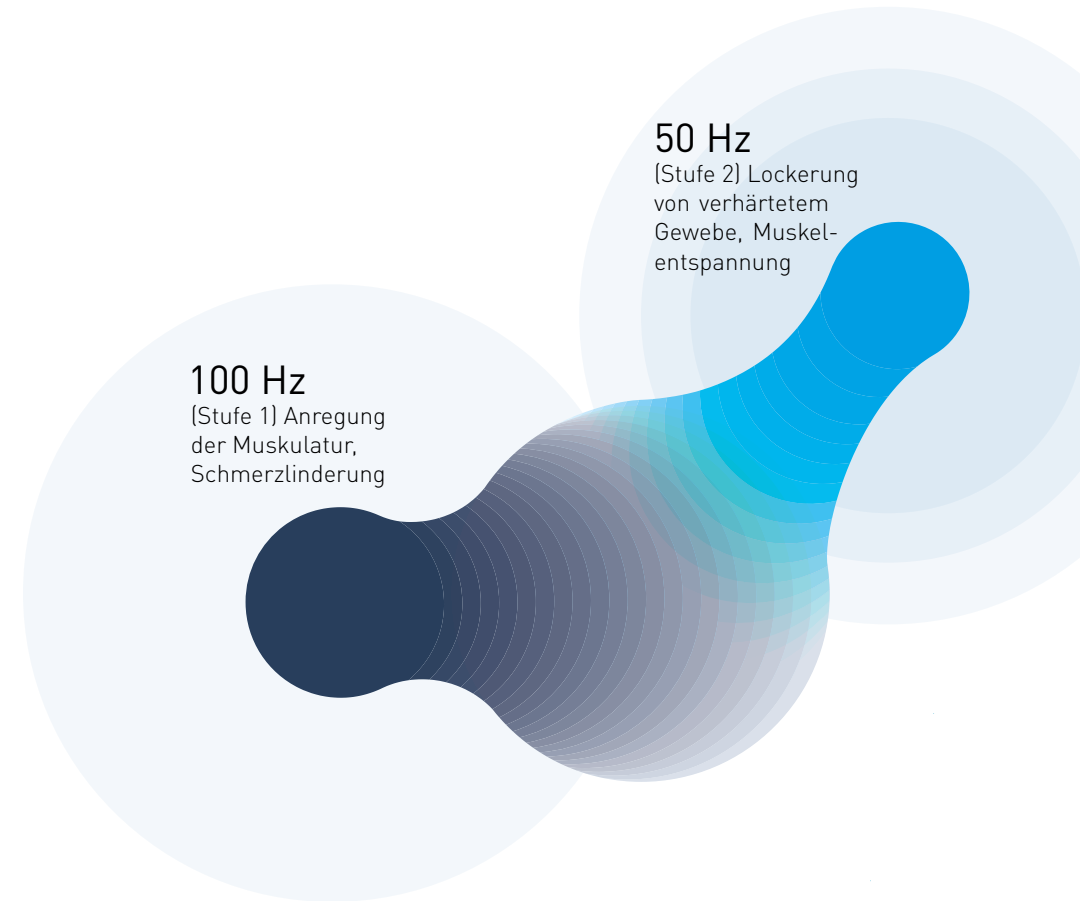

100 Hz

(Stufe 1) Anregung der Muskulatur, Schmerzlinderung

50 Hz

(Stufe 2) Lockerung von verhärtetem Gewebe, Muskelentspannung

Das neue NOVAFON bietet Einstellmöglichkeiten zwischen 2 Frequenzen und je 3 Intensitäten. Die intuitive Stufen-Schaltung ermöglicht eine effiziente Therapie und die exakte Einstellung des gewünschten Behandlungsmodus. Die unterschiedlichen Intensitäten reichen von sehr sanft bis stark und lassen sich dem individuellen Empfinden komfortabel anpassen. Dadurch eröffnet sich ein breites Behandlungsspektrum von Kopf bis Fuß.

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Schon viele Jahre erfolgreich
im Einsatz



„Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Es wurde in einer Ergotherapiepraxis wegen meiner Fingerarthrose angewandt und ich empfinde die Behandlung als sehr angenehm. Die Finger sind nach der Anwendung deutlich beweglicher.“*

Anwenderin E.¹

¹Homepage Produktbewertung NOVAFON pro, 25.03.2017. ²Therapeutenbericht Schlimm Physio & Relax, 26.08.2005. *Einzelfallbeobachtung: Es liegen u. U. nicht ausreichend klinische Daten vor, um eine generelle Eignung der Lokalen Vibrationstherapie bei der beschriebenen Symptomatik zu belegen. Es handelt sich um Anwenderzitate, die den NOVAFON Produktbewertungen entnommen wurden.

„Die Patienten berichten bei oberflächlich liegenden Gelenk Außenflächen (Knie, Fuß, Ellenbogen, Handgelenk, Schulter, Wirbelsäule, Kiefergelenk) sofort eine Schmerzerleichterung und eine Bewegungsverbesserung, die ca. 2-3 Stunden anhält. Nach 3 Wochen täglicher Behandlung sind Besserungen der Beschwerden bis 90% keine Seltenheit.“*

Schlimm Physio & Relax, Sindelfingen²



ALLE ANWENDERGRUPPEN

Das neue NOVAFON für Therapeuten und Privatanwender

Ob in der professionellen Therapie oder zu Hause: Das neue NOVAFON wird bei vielen Krankheitsbildern therapieunterstützend eingesetzt. In der Logopädie, Physio- und Ergotherapie stellt die bewährte NOVAFON Technologie ihre Wirksamkeit täglich unter Beweis und viele Therapeuten empfehlen ihren Patienten die Anwendung zu Hause. NOVAFON ist erwiesenermaßen wirksam und einfach anzuwenden.

ERGOTHERAPIE

Spastiken Verbesserung der Greiffunktion

Neglect Verbesserte Explorationsleistung zur betroffenen Seite

Schmerzen Schmerzreduktion und Steigerung des Bewegungsausmaßes

PHYSIOTHERAPIE

Spastiken Verbesserung des Gangbilds

Myofasziale Schmerzen Schmerzreduktion und Lockerung der Muskulatur

Sporttherapie Förderung der Regeneration durch Stimulation des Gewebes

LOGOPÄDIE

Stimme Verbesserung der Stimmfunktion

Schlucken Aktivierung der Muskulatur

Sprechen Verbesserte Ansteuerung der Muskulatur

Myofunktionelle Therapie Aktivierung hypotoner Muskulatur

Intraorale Behandlung Intraorale Wahrnehmungsförderung

HEILPRAXIS

Schmerzen Schmerzreduktion und Steigerung des Bewegungsausmaßes

Entzündungen und Gelenke Schmerzreduktion und Steigerung des Bewegungsausmaßes

Trigger- und Akupressurpunkte Schmerzreduktion und Tonusregulation

SELBSTANWENDER

Orthopädische Krankheitsbilder wie Muskel-, Gelenk- und Sehnen-schmerzen Schmerzreduktion und Regeneration

Neurologische Erkrankungen nach Einweisung Funktionserhaltung und Stimulation bei sensorischen Wahrnehmungsstörungen

VETERINÄR

Pferdetherapie Schmerzreduktion und Regeneration


Kleintiertherapie Rehabilitation orthopädischer und neurologischer Erkrankungen

6

EINFACHER AUFSATZWECHSEL

Intelligentes Stecksystem zum Anbringen der Aufsätze

Durch eine Vierteldrehung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand oder Geschick in den Händen leicht anzubringen oder zu lösen.

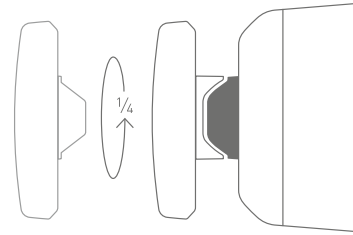

Teller Aufsatz
zur flächigen Anwendung
und zum Ausstreichen



Kugelaufsatz
kleinflächigere und
punktuelle Behandlungen

im Lieferumfang des
Geräts enthalten
DAS neue NOVAFON bzw.
DAS neue NOVAFON power,
Teller- und Kugelaufsatz,
USB-Ladekabel mit Netz-
stecker


7

WEITERE AUFSÄTZE

Optimieren Sie Ihre Behandlung mit diesen Aufsätzen*

Reha-Set

Teller Aufsatz XL ideal zur Behandlung von größeren Muskelgruppen
Igel Aufsatz besonders stimulierend
Kegelaufsatz für punktuelle und präzise Anwendungen

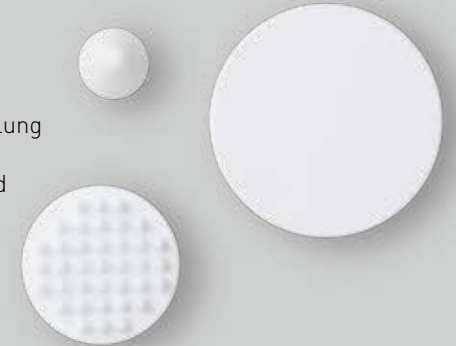


Magnetaufsatz

punktuelle und intensivierte Anwendung beispielsweise bei der Behandlung von Triggerpunkten oder tief liegenden Behandlungsarealen

Sensi-Roller

kombiniert die durchblutungsfördernde Igelballmassage mit den Vibrationen des NOVAFON Schallwellengeräts und stimuliert so die Oberflächen- und Tiefensensibilität

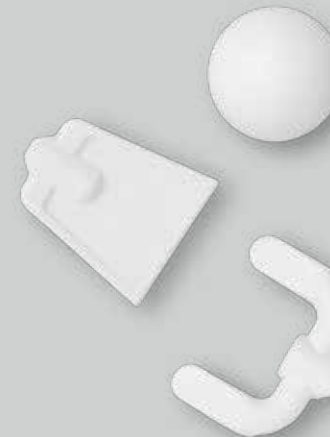

Physio-Set

Faszien-Ball Behandlung auch an konkaven Körperflächen
Faszien-Gabel sorgt für punktuellen Druck, zum Beispiel seitlich der Wirbelsäule
Faszien-Keil Ausstreichen größerer Muskelstränge und tief liegendem Faszienewebe

*Alle Aufsätze sind erhältlich in Weiß und Anthrazitgrau.

8

PRAKTISCHE LADESTATION

Vereinfachtes Laden und professionelle Präsentation

Die Ladestation ergänzt das neue NOVAFON perfekt: Ihre herausragenden Eigenschaften sind bequemes Laden durch einen stabilen Stand und eine vereinfachte Ablage des Geräts. Das schlichte und zeitlose Design unterstreicht zudem den professionellen Charakter in der Praxis oder zu Hause.



9

DURCHDACHTE DETAILS

Verschiedene Haltemöglichkeiten und intuitive Einhandbedienung

Die ergonomische Geräteform ermöglicht unterschiedlichste Greif- und Haltepositionen und erlaubt dadurch ein gezieltes Applizieren der Vibrationen. Das sorgt für eine überaus effiziente und komfortable Behandlung.

Alle Einstellungen lassen sich zudem intuitiv einhändig steuern. Entsprechend muss das Gerät während der Behandlung nicht abgesetzt werden und Behandlungsschritte können nahtlos ineinander übergehen.





- Anzeige Intensität
- Multi-Taster
Intensitätseinstellung
3 Stufen
- Frequenzeinstellung
100Hz/50Hz/OFF
- Anzeige Frequenzen

Komfortabel laden
auch ohne Lade-
station über USB-C

- Langlebiger Akku
Ladeanzeige
- Praktische Ladestation
leichte Handhabung,
stabiler Stand

10 TRANSPORT CASE Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport



Transport Case groß
Ob unterwegs oder zu Hause:
In diesem Case sind die neuen
NOVAFON Geräte inklusive
Zubehör jederzeit bestens auf-
gehoben. Seine hochwertige
robuste Außenschale und sein
dämpfendes Schauminlay ma-
chen es zum sicheren Aufbe-
wahrungsort! Die Netztasche
im Deckel bietet zusätzlichen
Stauraum für individuelles Zu-
behör.


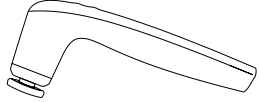








Transport Case klein
Wer unterwegs nur das Not-
wendigste braucht, findet in
dem optional erhältlichen Ein-
zelcase den idealen Begleiter.
Es wurde zur Aufbewahrung ei-
nes einzelnen neuen NOVAFON
Geräts einschließlich Netzteil/
Kabel oder Lieblingsaufsätzen
konzipiert. Individuelles Zu-
behör kann in der im Deckel be-
findlichen Netztasche verstaut
werden.

Beide Cases gibt es sowohl
einzeln als auch im Set.

GERÄTEVERGLEICH

Das neue NOVAFON power –
Das neue NOVAFON

Welches NOVAFON passt zu mir? In unserem Gerätevergleich können Sie herausfinden, welches NOVAFON am besten auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Für eine sanftere Behandlung empfindlicher Körperstellen empfehlen wir das neue NOVAFON. Für die Behandlung großer und kompakter Muskelgruppen, z. B. bei Sportlern, kann das neue NOVAFON power mit höherer Intensitätsspanne, größerer Amplitude und Tiefenwirkung die bessere Wahl sein. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch und ganz individuell. So finden Sie das NOVAFON, das speziell für Ihren Anwendungsbereich geeignet ist.

	DAS NEUE NOVAFON POWER	DAS NEUE NOVAFON
		
ANWENDERGRUPPEN	Selbstanwender/Sportler Physiotherapeuten Heilpraktiker	Selbstanwender Logopäden Ergotherapeuten Heilpraktiker
MAXIMALE VIBRATIONSSTÄRKE		
ANWENDUNGSGEBIETE	ganzer Körper empfohlen zur Behandlung kompakter Muskelgruppen & orthopädischer Erkrankungen wie z. B. Muskelverspannungen, Sportverletzungen u. v. m.	ganzer Körper empfohlen zur Behandlung empfindlicher Körperstellen & Erkrankungen wie z. B. Sehnen-erkrankungen, Arthrose, Narben, CMD u. v. m.
INTENSITÄTSABSTUFUNGEN	Intensität 1  Intensität 2  Intensität 3 	  
PRODUKT-MERKMALE		
Akkuleistung	3400 mAh	2400 mAh
Ø Gesamt-Akkulaufzeit	3,5 h	3,5 h
Amplitude	0,3 – 4 mm	0,3 – 3,5 mm
Tiefenwirkung	6 cm +	6 cm
Behandlungsstufen	100 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz
Gewicht Handstück	245 g	243 g
Abmessungen	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)

Unsere Therapeuten beraten Sie persönlich, damit Sie optimal behandeln

Wir möchten Sie bei der Behandlung mit dem NOVAFON unterstützen und bieten Ihnen hierzu verschiedene Möglichkeiten:



Anwendungsberatung

Die telefonische Anwendungsberatung mit einem unserer Therapeuten ist für Sie kostenlos. Passen Sie Ihre Behandlung mit dem NOVAFON Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



Web-Seminare

Unsere Web-Seminare sind ebenfalls kostenlos. Ein Therapeut führt Sie in verschiedene Themen ein und erläutert zum Beispiel die Grundfunktionen und Wirkweise des NOVAFON.



Fortbildungen

Als Therapeut können Sie zusätzlich an Fortbildungen teilnehmen. Diese sind umfangreicher als die Web-Seminare und werden von unseren NOVAFON Therapeuten durchgeführt.



Anwendungsbuch

Sie erhalten zu jedem NOVAFON unser umfangreiches Anwendungsbuch. Informieren Sie sich über die verschiedenen Anwendungsgebiete für sich bzw. Ihrer Patienten.

Seit mehr als 40 Jahren stellt die NOVAFON GmbH elektromedizinische Geräte her. Die Marke NOVAFON ist Botschafter der Lokalen Vibrationstherapie und steht für Qualität und Innovation. Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden.



Zertifiziertes Medizinprodukt

NOVAFON ist vom TÜV SÜD als Medizinproduktehersteller zertifiziert. Die Vibrationstherapie ist auf ihre Wirksamkeit untersucht und die Ergebnisse daraus wurden in zahlreichen Studien veröffentlicht.



Made in Germany

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.



Produkte
novafon.de/produkte

Anwendungsbereiche
novafon.de/anwendung

Web-Seminare
novafon.de/web-seminare

Fortbildungen
novafon.de/fortbildungen

www.novafon.com
info@novafon.de
+49 7151 133 970

NOVAFON GmbH
Daimlerstr. 13
71384 Weinstadt



[novafon_de](#)

[novafon_medical](#)

[novafon_logo](#)

